

 **Sallaz Grenier**

pelejo antes de injetar o produto. Se existir alguma dor, a injeção tem de ser realizada utilizando mapiologia médica. Se a injeção estiver fora do espaço sinovial, podem ocorrer lesões irreversíveis e decoloração da pele.

- Efetuar a aspiração de qualquer efusão articular antes da injeção do produto.
- Injetar lentamente no espaço articular pretendido.

A quantidade e ser a injeção dependem da anatomia do doente. Adopção o médico pode definir a dose a injetar.

- Não utilizar uma quantidade excessiva do produto: não ultrapassar 2 ml.
- Se a agulha estiver inflamada, não aumentar a pressão necessária para a injeção. Substituir a agulha.
- Se a agulha estiver inflamada intra-articular do peço uma vez por semana durante 3 semanas consecutivas.

RECOMENDAÇÕES AOS DOENTES


- Recomenda-se que o doente evite atividades intensas ou atividades que envolvam o peso do corpo durante um longo período, como tênis, corrida ou caminhadas longas, no espaço de 48 horas após a injeção.
- O médico deve informar ao doente que este tem de manter informado sobre quaisquer desenvolvimentos "anormais" na área tratada (ver Efeitos adversos).
- Utilizar uma compressa de gelo após a injeção, particularmente se ocorrerem edemas ou dor.

RECOMENDAÇÕES AOS MÉDICOS

- O médico tem de informar o doente sobre quaisquer potenciais efeitos adversos indesejados e métodos que possam ocorrer após a injeção do produto, em particular (esta lista não é exaustiva):
 - Alergia, desconforto, rigidez articular, efusão articular.
 - Distúrbios musculoesqueléticos.
 - Sensação de calor, sensação de peso.
 - Dor, dor de cabeça ou do tecido subcutâneo (eritema, prurido).
 - Hematomas.
- Os efeitos adversos indicados acima não devem durar mais de uma semana e podem ser aliviados através da aplicação de gelo após a injeção.
- Eficácia ou efeito fracos.
- Raramente, podem ocorrer complicações pós-operatórias, como infecção, hemorragia ou irritação séptica.
- Foram comunicados casos raros de hipersensibilidade na literatura após injeções de ácido hialurônico. O doente tem de ser informado acerca disto.
- Em doentes com uma predisposição grave para alergias, doença dermatológica, problemas da hemostase ou doença inflamatória, no caso das precauções de utilização não terem sido seguidas, a incidência de efeitos adversos pode aumentar.
- O doente tem de informar o médico acerca de qualquer um dos efeitos adversos superacionados que dure mais do que uma semana ou do aparecimento de quaisquer outros efeitos adversos.
- O doente deve ser informado sobre a possibilidade de o fabricante logo que possível e deve elevar o tratamento adequado.

CONSERVAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE

- Os produtos tem de ser utilizados antes do prazo de validade indicado na embalagem e na seringa.
- Os produtos tem de ser conservados na sua embalagem original a uma temperatura entre 2°C e 35°C (36°F a 95°F), ao abrigo do frio intenso e da luz.
- Se as condições de conservação não forem respeitadas, o desempenho do produto pode ficar comprometido.

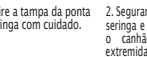

1. Retire a tampa do ponto da seringa com cuidado.
2. Segurar no ponto da seringa e inserir com firmeza o canhão da agulha na extremidade Low-Loose do forame, assegurando que sente alguma traçãoLOCK.
3. Se aplicável, remover a tampa da agulha.

Cuidados: Consultar o folheto de instruções.

Prazo de validade: Utilizar antes da data indicada.

Código de lote: Não reutilizar.

Estérilizado com vapor ou calor seco. O conteúdo da seringa foi esterilizado com calor seco.

Via de fundo estéril: O conteúdo das seringas foi esterilizado com calor húmido.

Limites de temperatura: Conservar entre 2°C/35°C (36°F/97°F).

Manten ao abrigo da luz solar.

Fragil, manusear com cuidado.

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Fabricante:

CE

CE 0454

LABORATOIRES FRANÇAIS
 12 rue de la République
 92100 Nanterre
 France
 Tel: +33 (0) 1 47 39 11 91
 Fax: +33 (0) 1 47 39 11 90

AMERICAN TECHNOLOGICAL
 10000 W. Higgins Road
 Chicago, IL 60631-1500
 USA
 Tel: +1 (708) 441-2222
 Fax: +1 (708) 441-2223

LABORATOIRES FRANÇAIS
 12 rue de la République
 92100 Nanterre
 France
 Tel: +33 (0) 1 47 39 11 91
 Fax: +33 (0) 1 47 39 11 90

AMERICAN TECHNOLOGICAL
 10000 W. Higgins Road
 Chicago, IL 60631-1500
 USA
 Tel: +1 (708) 441-2222
 Fax: +1 (708) 441-2223

OPC04-14-01-12-2019-14

[illegible]